

 Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-	<b>Leistungsverzeichnis</b>	Version: 4 gültig ab: 28.05.2024 Revision: 28.05.2025
	<b>LV_Triazolam</b>	Intranet Seite 1 von 3

## 1. Klinische Indikation

**Analyt:**        **Triazolam**

Auswahl Handelsnamen: Halcion®

- Therapeutisches Drug-Monitoring

### Pharmakologie:

- Triazolam ist ein Benzodiazepin, das zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen eingesetzt wird.
- Plasma-HWZ: im Mittel 1 – 5 Std.
- Metabolisierung über CYP3A4. Kaum klinisch wirksame Metabolite. Keine Kumulationsgefahr. Elimination erfolgt überwiegend renal.
- Cave: nicht mit zentral dämpfenden Pharmaka, Alkohol, Beta-Rezeptorenblockern oder atemdepressiven Pharmaka kombinieren.
- Cave: Keine Kombination mit Inhibitoren von CYP3A4 (z.B. Azol-Antimykotika, Clarithromycin, Ritonavir). Bei Kombination mit Ketoconazol Verlängerung der Eliminations-HWZ auf 40 Std. möglich.
- Bei Kombination mit Induktoren von CYP3A4 (z.B. Johanniskraut, Carbamazepin) erfolgt ein beschleunigter Abbau von Triazolam.

## 2. Anforderung / Befundmitteilung

Anforderung	Elektronisch mittels Lauris Laboranforderungssystem
DKGNT-Nummer /-Punkte	4210 / 900
Probenart, -volumen	EDTA-Plasma, Monovette rot, mind. 1 ml.
Versand	ungekühlt bis 1 Tag
Nachforderung nach Probengewinnung	3 Tage
Häufigkeit der Untersuchung	2 bis 3 x wöchentlich
Befundmitteilung	2 bis 3 Werktage nach Probeneingang und Validation über KAS und/oder Netzdruck

	Erstellt von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Name	Matthias Hentschel	Martina Schmidt	Birgit Stoffel-Wagner
Datum	27.05.2024	28.05.2024	28.05.2024

 universitäts klinikumbonn  Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-	<b>Leistungsverzeichnis</b>	Version: 4 gültig ab: 28.05.2024 Revision: 28.05.2025
	<b>LV_Triazolam</b>	Intranet  Seite 2 von 3

### 3. Anforderungen an das Untersuchungsgut

#### 3.1 Anforderung an die Patientenvorbereitung

Die Blutentnahme sollte 0,7 – 2 Stunden nach Einnahme erfolgen.

#### 3.2 Entnahme, Transport

Die Dauer der Stauung sollte 30-60 Sekunden nicht übersteigen. Nach erfolgreicher Punktion ist die Stauung zu lösen und das Blut ohne zu schnelles Aufziehen zu entnehmen.

Bei einer Blutentnahme von Serum-, EDTA-, Citratröhrchen muss das Serumröhrchen immer als erstes abgenommen werden, um eine Kontamination mit den Inhaltsstoffen der anderen beiden Röhrchen zu vermeiden.

Blutentnahmen aus Kathetern und Venenverweilkanülen sollten vermieden werden. Muss aus einem Katheter abgenommen werden, wird der Katheter zweimal mit je 5 ml physiologischer Kochsalzlösung durchgespült, 2 ml Blut sind zu verwerfen und erst dann kann die Blutentnahme für die Analytik erfolgen.

Die Proben sind schnellst möglich in das Labor zu transportieren.

Plasmaproben sind dunkel und gekühlt (4°C) gelagert für 24 Stunden stabil. Bei Aufbewahrung über 24 Stunden hinaus sollten die Proben bei ca. -20°C gelagert werden.

### 4. Prinzip des Untersuchungsverfahrens

#### 4.1 Methode und Prinzip und Kurzbeschreibung der Ergebnisberechnung

Messverfahren: Ultrahochdruck-Flüssigkeitschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion (LC-MS/MS)

Reagenz: MassTox®, TDM Serie A Benzodiazepine 2 im Serum/Plasma, Chromsystems Instruments and Chemicals GmbH

Gerät: KIT\* PTQ QQQ 4500MD Triple-Quadrupol-Tandem-MS mit (U)HPLC, AB SCIEX Germany GmbH

Die Messunsicherheit lässt sich jeweils aktuell nach den Vorgaben der ZL01\_VA\_Messunsicherheit ermitteln. Auskünfte zur Messunsicherheit erteilen wir auf Anfrage, damit die medizinische Interpretation labordiagnostischer Ergebnisse sinnvoll und patientenorientiert erfolgen kann. (siehe Homepage, Rubrik Qualitätsmanagement)

#### 4.2 Mögliche Störfaktoren und Fehlerquellen

Gel-Separatoren können analytische Störungen verursachen.

 universitäts klinikum <b>bonn</b>  Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-	<b>Leistungsverzeichnis</b>	Version: 4 gültig ab: 28.05.2024 Revision: 28.05.2025
	<b>LV_Triazolam</b>	Intranet  Seite 3 von 3

Für diagnostische Zwecke sind die Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen zu werten.

## 5. Referenzbereiche

Therapeutischer Bereich: 2–20 µg/l (0,7 – 2 Stunden nach Einnahme zur Schlafinduktion)  
 Kritischer/alarmierender Bereich: Werte >40 µg/l können zu toxischen Symptomen führen.  
 Der behandelnde Arzt muss bei jedem Patienten den richtigen therapeutischen Bereich ermitteln.

Quellen: AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry:  
 Update 2017; Pharmacopsychiatry 51 (1-02): 9-62  
 Aktuelle Fachinfo Halcion®, Stand August 2020